

## METAANFETAMINAS (ÉXTASIS) en cassette

Es una potente droga estimulante. Usada en forma de pastillas o también inyectada. La forma cristalizada puede fumarse y es la forma más contundente de ingerirla. Es conocida en la calle por los nombres de speed, meth, crack, hielo, vidrio o cristal. Una vez introducida en el cuerpo, del total, de un 4 a un 7% se convierte en anfetamina, por lo tanto, la orina de un usuario de metaanfetamina puede contener también anfetamina. Algunos de los efectos de su uso son: incremento de los latidos del corazón, insomnio, mayor actividad física y disminución del apetito. El uso de la metaanfetamina puede causar daños irreversibles en el cerebro y producir convulsiones que pueden conducir a la muerte. La d-metaanfetamina y sus metabolitos son estimulantes del sistema nervioso central cuyas propiedades farmacológicas incluyen un estado de alerta, estimulación e incremento de la energía, y, en general, un estado de euforia. Dosis elevadas y un uso repetitivo pueden provocar unos altos niveles de tolerancia y una dependencia fisiológica. Éxtasis es el nombre callejero de la 3,4 metil ene dioxi metaanfetamina. Combina los efectos estimulantes de la metaanfetamina con un alucinógeno. Algunos de los efectos de su uso incluyen un incremento de la frecuencia cardíaca, insomnio, incremento de la temperatura corporal y una alta tasa de deshidratación. Los efectos fisiológicos incluyen confusión, depresión, ansiedad y paranoia. Su uso provoca daños en el cerebro, corazón y fallos renales.

**Descripción física:** cristales, tabletas, cápsulas de varias tallas, formas y colores.

**Modo de acción:** estimulante del sistema nervioso central.

**Periodo de detección mínima en la orina:** de 2 a 7 horas después de su consumo.

**Periodo máximo de detección en la orina:** de 2 a 4 días después de su consumo.

**Nombre farmacéutico:** Desoxy, Metedrina.

**Uso farmacéutico:** tratamiento de la obesidad y de la narcolepsia.

**El nivel de corte de este test es de 500 ng/ml**

**Sensibilidad:** Quickscreen detecta los principales metabolitos de la metaanfetamina a una concentración de **500 ng/ml**. La sensibilidad fue evaluada en 80 muestras de orina individuales. La prueba identificó correctamente 40 de 40 muestras con una concentración de **505 a 996 ng/ml**.

**Especificidad:** en tres estudios de laboratorio independientes, incluyendo dos ensayos clínicos, la especificidad combinada fue superior al 99% cuando se comparó con el método GC/MS.

**Precisión:** ocho grupos de orina (mezcla de diferentes pacientes) cubriendo de 0 a **100 ng/ml** fueron evaluados dos veces al día durante 20 días. El coeficiente de variación fue menor del 1% en todas las muestras.

**Las siguientes sustancias dan resultados positivos a los test de metaanfetaminas:**

Sustancia	ng/ml
N-Acetylprocainamida	100,000
l-Anfetamina	100,000
d-Anfetamina	20,000
dl-Anfetamina	50,000
(-)-Deoxyfedrina	1,000
(+)-v-Efedrina	100,000
(+)-Efedrina	100,000
(+)Efedrina-	100,000
(-)-v-Efedrina	1.000,000
(-)-Efedrina	1.000,000
Fenfluramina	100,000
(+)Isoproterenol	1,500
Mefentermina	10,000
(+)-Metaanfetamina	500
(+)-3,4-Metylenedioylanfetamina	100,000
(+)-3,4- Metylenedioylmetaanfetamina	3,500
Nylidrin	5,000
Fentermina	300,000
@-(+)-a-Fenietilamina	100,000
Tyramina	62,500

**Las siguientes sustancias no interfieren a una concentración de 0'1 mg/ml, pero podría interferir a mayor concentración:**

Acetaminopheno Y Acetona Y N-Acetylprocainamida Y Acido Acetilsalicílico (Aspirina) Albúmina Y Alphenal Y Alprazolam (A) Y Amantadina Y (+) - Amethopterina Y Amikacina Y dl-Aminoglutetimidina Y Aminopyrina Y Amitriptylina Y Amobarbital Y Amoxicilina Y d, dl & l-Anfetamina Y Ampicilina Y Apomorfina Y Aprobarbital Y (-)-Arterenol Y l-acido ascórbico (Vitamina C) Y Aspartato Y d, dl & l- Acido aspártico Y Atropina Y Barbitol Y Acido barbitúrico Y Acido Benzoico Y Benzoilecgonina Y Benzofetamina Y Benzotropina Methano Sulfonato Y Bilirrubina Y Bromazepam Y Bromocriptina Mesylato Y(+)- Brompheniramina Y Butabarbitol Y Butalbital Y Butethal Y Caféina Y Cannabidiol Y Cannabinol Y Carbamazepina Y Cephalexina Y Chloranphenicol Y Chlordiazepoxido Y Chloroquina Y (+)&(+)- Chlorpheniramina Y Chlorpromazina Y Chlorpropamida Y Chlorprothixeno Y Cimetidina Y Clemastina Y Clomipramina Y Clonazepam Y Clonidina Y Cocaína Y Codeína Y (-)-Cotina Y Creatinina Y Cyclizina Y Cyclobenzaprina Y Cyclosporina A Y Cyproheptadina Y - Deoxyfedrina Y Desipramina Y Desmethyldiazepam Y Dextromethorphano Y 5,5-Acido dialilbarbitúrico Y Diazepam Y Diflunisal Y Digoxin Y 4- Dimethylaminoantipyrina Y Diphenhydramina Y Diphenoxilato Y 5,5-Diphenylhydantoina Y Disopyramida Y Doxepina Y Doxylamina Y (+) & (-) Efedrina Y (+) & (-) -Epinefrina Y Erythromycina Y Estriol Y Estrone-3-Sulfato Y Etanol Y Ethosuximida Ethyl-p-Aminobenzoato Y Acido Ethylenediaminetetraacético Y 2-Ethyl-1,5 Dimethyl-3,3-Diphenyl-pyrrolidina (EDDP) Y Ethylmorfinina [B] Y Fenfluramina Y Fenopropeno Y Fentanyl[B] Y Flunitrazepam Y Flurazepam Y Furosemda Y Gentamicina Y Acido gentésico Y Glucosa Y dl - Glutetimidina Y Griseofulvina Y Guaicol Glyceryl Ester Y Hemoglobina Humana Y Heroína [B] Y Hexobarbital Y Hydrochlorothiazida Y Hydrocodona Y Hydromorphona Y Acido o-Hidroxihipúrico Y 5-Hydroxyindol-3- Acido Acético Y 5-Hydroxy-indol-2- Acido Carboxílico Y 1-1-Hydroxytyramina Y Hydroxizina Y Ibuprofeno Y Imipramina Y Indol-3-Acido Acético Y Indol-3- Acido Butírico Y Indomethacina Y (+), (+) & (-) Isoproterenol Y Isoxsuprina Y Kanamycina Y Ketamina Y Ketoprofeno Y Labetalol Y Levorphanol Y Lidocaína Y Carbonato de Litio Y Lorazepam Y Lormetazepam Y Lisérgico Acido Diethylamida (D) Y Medazepam Y Melanina Y Meperidina Y Mephertermina Y Meprobamato Y Mescalina Y Dl-Metanefrina Y +-Methadona Y (+)-Methamphetamine Y Methaqualona Y (S)-6 Methoxy--Methyl-2-Naphthaleno Acético Acido Y 2-Methyl-3-(3 Y 4- Dihydroxyphenilo)-dl & L-Alanina Y 3,4-Methylenedioxyamphetamine Y 3,4- Metylenedioxyamphetamine Y Methylphenidato Y Methylprylon Y Metoprolol Y Morfina Y Morfina-3-B-D-Glucuronido Y Nafcilina Y Nalorfina Y Naloxona Y Naltrexona Y Naphazolina Y Acido Naphthalenoacético Y Naproxeno Y Netilmicina Y Niacinamida Y Nialamida Y Acido Nicotínico Y Nifedipina Y Nitrazepam Y Nomifensina Y Norcodeína Y Nordoxepina Y Norethindrona Y Normorfina (B) Y 11-Nor-THC-Acido Carboxílico (C) Y Nortriptylina Y Noscapina Y Nyldrina Y Orphenadrina Y Acido Oxalico Y Oxazepam Y Oxycodona Y Oxynretazolina Y Papaverina Y Penicilina G Y Pentazocina Y Pentobarbital Y Phencyclidina Y Pheizina Y Pheniramina Y Phenobarbital Y Phenothiazina Y Phentermina Y Phenylacetona Y l-Phenylalanina Y Phenylbutazona Y trans-2- Phenylcyclopropylamina Y l-Phenylephrina Y -(+)-a, (+) & B- Phenylethylamina Y (+)Phenylpropanoamida Y Piroxicam Y Clorato Potásico Y Prazepam Y Prednisolona Y Primidona Y Procainamida Y Prochlorperazina Y Promazina Y Promethiazina Y (+)-Propoxypheno Y Acido 2-Propylpentanoico Y Protriptylina Y Quinidina Y Quinina Y Ranitidina Y Riboflavina Y (-) Escopolamina Y Secobarbital Y Clorato Sódico Y Sulindac Y Termazepam Y Terbutalina Y Tetracyclina Y Tetraethyltiurato Bisulfato (Antabus) Y Tetrahydrozolina Y Theobaina Y Theophyllina Y Thioridazina Y cis-Thiothixeno Y Tobramicina Y Triamtereno Y Triazolam (B) Y Trifluoperazina Y Trifluoromazina Y dl-Trihexyphenidyl Y Trimethobenzamida Y Trimethoprim Y Trimipramina Y Triprolidina Y Tyramina Y Urea Y Acido Úrico Y Vancomycina Y (+) Verapamil Y Zomepirac

- (A) No se observaron interferencias a una concentración de 25 ug/ml
- (B) No se observaron interferencias a una concentración de 10 ug/ml
- (C) No se observaron interferencias a una concentración de 5 ug/ml
- (D) No se observaron interferencias a una concentración de 2,5 ug/ml


## INSTRUCCIONES GENERALES

Quickscreen es un test rápido que utiliza una tecnología basada en un inmunoensayo cromatográfico rápido en un solo paso sencillo, para la pronta y cualitativa detección de drogas en la orina. Los niveles de corte que detectan estos test son los recomendados por el SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), que forma parte del NIDA (U.S. National Institute of Drug Abuse). Este test proporciona un resultado analítico preliminar. Debe usarse un método químico alternativo más específico para obtener un resultado analítico confirmado. El método de confirmación más usado es la Cromatografía de gases y la Espectrometría de masas (GC/MS), aunque existen otros métodos químicos disponibles. Cualquier resultado obtenido con este kit se debe consultar con un profesional especialista, especialmente cuando el resultado preliminar es positivo. Los test para drogas basados en la orina abarcan un amplio rango que van desde sencillos test de inmunoensayo a complejos procedimientos analíticos. La sensibilidad y rapidez de los inmunoensayos los han hecho el método más aceptado de análisis preliminar de detección de drogas de abuso en la orina. Esto permite al laboratorio eliminar un gran número de muestras negativas y centrarse en un pequeño número de muestras.

### Cómo funciona este kit

Los test Quickscreen usan una tecnología de inmunoensayo en fase sólida para la detección cualitativa de metabolitos de drogas de abuso en la orina humana. Son un aparato absorbente cromatográfico en el que una droga o sus metabolitos contenidos en una muestra, compiten con conjugados de la droga inmovilizados en una membrana porosa por un número limitado de enlaces. El aparato emplea una combinación única de anticuerpos monoclonales y policlonales para identificar selectivamente a la droga contenida en la orina con un alto grado de confianza. Para proceder al test, se añaden unas gotas de orina en el

pocono del aparato «S», donde es absorbida por capilaridad. Los metabolitos presentes en la orina se unen con los anticuerpos presentes en la membrana, saturándolos e inhibiendo el enlace de los anticuerpos con el conjugado de droga de la membrana. Esto impide la formación de una línea en la membrana. Por lo tanto, la muestra de orina con droga no generará una línea en la ventana del test, indicando un resultado preliminar positivo debido a la competencia con los metabolitos de la muestra, mientras que una muestra negativa de orina generará una línea en la ventana del test, indicando un resultado negativo debido a una ausencia de metabolitos de la droga en la muestra de orina. Si la droga está presente en la muestra de orina, rivaliza con la droga (que está

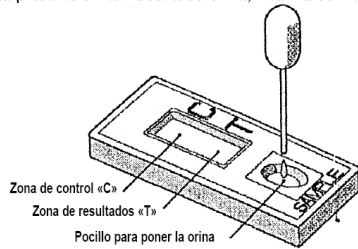

inmovilizado en la membrana), por los limitados anticuerpos presentes en la región «T». Esto inhibe el desarrollo de una banda distintiva de color rosáceo. Lo cual indica una potencial muestra positiva. Cuando las muestras están a una concentración por debajo de los niveles de corte (1), los anticuerpos no se enlazan a los metabolitos en la región «T». Esto provoca una banda coloreada que indica un resultado negativo. En ambos casos debe aparecer una línea de control en la ventana «C» para confirmar la viabilidad del test. Esta línea de control se debería ver siempre si el test está bien hecho. Esta línea es un control de calidad interno.

### Materiales que se incluyen en el kit

- Tira reactiva dentro de una cassette.
- Pipeta de plástico.
- Almohada desecante para absorber la humedad.
- Instrucciones de uso del test.

### Precauciones

1. Evitar la contaminación de cruces de muestras de orina. Para ello use un frasco para cada muestra de orina y cuentagotas desechables.
2. Las muestras de orina son potencialmente infecciosas. Por eso debe tomar las precauciones de higiene habituales para una manipulación adecuada.
3. El kit debe permanecer en su estuche original hasta su uso.
4. No usar el test si el estuche está dañado o el sello roto.
5. No usar el kit después de la fecha de caducidad.
6. El test sirve para un solo uso.
7. Este método está establecido para su uso con orina. No se han evaluado otros fluidos.

### Almacenaje

El kit debe ser almacenado a temperatura ambiente (de 15 a 28°) dentro del estuche original. *No enfriar*. La fecha de caducidad fue establecida bajo estas condiciones de almacenamiento. Ver la fecha de caducidad para la estabilidad del test.

### Recolección de la muestra y preparación

Las muestras frescas de orina no requieren ninguna manipulación especial o pretratamiento. Las muestras deben ser recolectadas en un vaso limpio o en un recipiente de plástico que no haya sido usado previamente. Si el test no se va a efectuar e inmediato, las muestras deben ser refrigeradas (2°- 8°C) o congeladas. Para un almacenaje más prolongado, las muestras han de congelarse a -20°C o menos. Antes de ser evaluadas, la muestra de orina debe estar a temperatura ambiente.

### Procedimiento

1. Póngase cómodo. Tenga un reloj a mano.
2. Las muestras de orina deben ser usadas inmediatamente. Si usted ha guardado en un frigorífico la muestra, asegúrese de que esté a temperatura ambiente antes de realizar el test.
3. Abra el sobre y extraiga el kit. Asegúrese de no tocar la zona donde tienen que aparecer los resultados.
4. Colocar el test sobre una superficie plana y limpia. Usando la pipeta que se provee con el test, añadir 4 gotas de orina en el pocillo marcado con una «S». Dejar que cada gota se absorba antes de añadir la siguiente. Esperar cinco segundos entre cada gota.
5. Leer el resultado del test a los 10 minutos. Debe aparecer una banda coloreada en el área de resultados «C» que indica que el test ha terminado.
6. Como usted irá siguiendo el desarrollo del test observará que la muestra de orina se va moviendo hacia arriba mientras el test se está realizando. Si observa que no corre bien la orina, añada más gotas. En la

mayor parte de los casos, la línea de control «C» será visible antes de que la línea «T» lo sea. Esto es normal y significa que el test se ha efectuado correctamente.


7. Leer el resultado inmediatamente. Los resultados leídos después de quince minutos pueden ser considerados inválidos.

La zona de control (zona «C») y otra en la zona de resultados (zona «T»). Este resultado significa que la prueba ha dado negativo.

### Interpretación de resultados en los kit unitarios

- **RESULTADO NEGATIVO.** Un resultado negativo lo indican dos bandas de color rosáceo (de cualquier intensidad): una en la zona de control (zona «C») y otra en la zona de resultados (zona «T»). Este resultado significa que la prueba ha dado negativo.
- **RESULTADO POSITIVO.** Aparece una línea de color rosa en la zona de control (zona «C») y **ninguna línea** en la zona de resultados (zona «T»). Este resultado ha de ser considerado positivo de una forma **PRELIMINAR**. Para un resultado definitivo la muestra debe ser enviada a un laboratorio para un segundo análisis.
- **RESULTADO NULO.** Un test debe ser considerado sin resultado alguno si no aparece ninguna banda de color ni en la zona de control (zona «C») ni en la zona de resultados (zona «T»), o bien, si sólo aparece una banda coloreada en la zona «T» La presencia de una banda de color en la zona de control «C» es siempre necesaria para validar el resultado.

### Interpretación de resultados

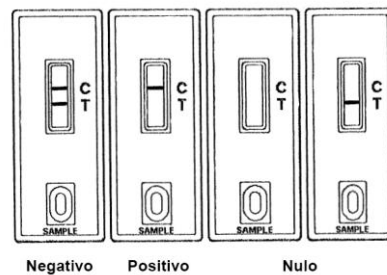

### Limitaciones de este producto

1. Existe la posibilidad de que alguna de las sustancias u otros factores no descritos en estas instrucciones puedan interferir en el test, causando falsos resultados (por ejemplo, errores técnicos o de procedimiento).
2. Este método ha sido testado usando solamente orina. No se han evaluado otros fluidos.
3. Muestras de orina adulteradas pueden producir resultados erróneos. Agentes oxidantes fuertes como el hipoclorito pueden oxidar las muestras. Si se sospecha que una muestra ha sido adulterada, se debe obtener otra.
4. Ocasionalmente, muestras que contengan niveles de metabolitos por debajo del nivel de sensibilidad del test pueden producir resultados positivos.
5. Todas las muestras positivas deben ser confirmadas por otros métodos. La espectrometría de masas y cromatografía de gases (GC/MS) es el método más usado para confirmar la presencia y la concentración de la droga en la orina.
6. Este test es un ensayo cualitativo. No está diseñado para determinar la concentración cuantitativa de metabolitos o los niveles de intoxicación.
7. Debe realizarse el test con una muestra de orina que no sobrepase los siete días desde que se tomó.

- (1) Nota: Nivel de corte es la cantidad de droga contenida en la orina necesaria para ser detectada por el test. Esta cantidad está determinada por la Food and Drug Administration.



**Phamatech, Inc.**  
10151 Barnes Canyon Rd.  
San Diego CA 92121 USA  
Teléfono: (858) 643-5555  
Fax: (858) 635-5843

### Distribuido en España por: PERFELENA

c/ Sierra de Algodonales 18  
28500 Arganda (Madrid)  
Tel. 918720953 / Fax: 918729502  
Web: [www.perfelena.com](http://www.perfelena.com)  
E-mail: [carlos@perfelena.es](mailto:carlos@perfelena.es)